

LMArte™

LM

feel the difference



SCOLPIRE CAPOLAVORI



Strumenti per conservativa **LMArte™**

STRATIFICAZIONI ESTETICHE DI SUCCESSO

LM-Arte™ è un set di strumenti innovativo dedicato al restauro estetico, specificamente progettato per la stratificazione di materiali compositi. Ciascuno strumento è associato a un codice colore ed è denominato in base alla specifica funzione, per consentire trattamenti di restauro semplici, efficaci e veloci. Il design leggero ed ergonomico dell'impugnatura LM™, abbinato all'elevata qualità dei materiali delle punte, garantisce ottime caratteristiche di sensibilità tattile e maneggevolezza per i migliori risultati clinici.

COLLABORAZIONE CON STYLEITALIANO™

La serie di strumenti LM-Arte™ è stata sviluppata in collaborazione con Styleitaliano™, un gruppo di dentisti esperti che condividono con noi la passione per il miglioramento dell'odontoiatria.

Il movimento Styleitaliano™ nasce da una semplice idea di due amici, il Dott. Walter Devoto e il Dott. Angelo Putignano. I rinomati esperti nel campo dell'odontoiatria conservativa ed estetica si erano resi conto che, sebbene fossero disponibili materiali idonei a realizzare restauri diretti esteticamente belli, mancavano gli strumenti appropriati per applicarli con successo. Grazie alla dedizione di LM-Dental™ per l'eccellenza produttiva, è stato sviluppato il concetto esclusivo degli strumenti LM-Arte™, un vero e proprio punto di svolta nell'odontoiatria estetica.



CONTRIBUITE AL SUCCESSO!

Per casi clinici di conservativa con strumenti LM-Dental™ visitate il sito web di Styleitaliano™ all'indirizzo www.styleitaliano.org



Seguite ed entrate a far parte della community Styleitaliano™ sui canali social



Styleitaliano™ è una comunità in crescita di dentisti esperti che contribuiscono con le proprie idee a migliorare la semplicità e la prevedibilità delle procedure odontoiatriche quotidiane. Oggi raggiunge migliaia di dentisti presenti sui canali social con video demo illustrativi, lezioni, corsi e conferenze.




VISITATE IL SITO WEB
all'indirizzo www.lm-dental.com/LM-Arte!

LMArte™ Dark Diamond edition

NOVITÀ!

MODELLAZIONE PRATICA E PRECISA DEL MATERIALE COMPOSITO

Gli strumenti LMArte™ Dark Diamond sono il risultato più recente della collaborazione tra Styleitaliano™ e LM-Dental™ e sono caratterizzati da un esclusivo rivestimento con effetto antiaderente per posizionare e modellare in modo semplice e preciso la resina composita.

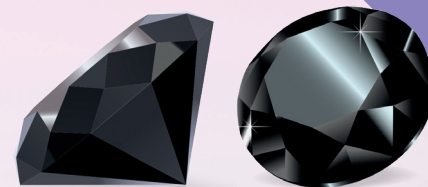

Cosa dicono gli esperti clinici? Scansionate il codice QR!

“

La sensibilità, la flessibilità e la precisione sono le stesse degli strumenti LMArte™ convenzionali, ma il rivestimento LM Dark Diamond™ elimina il problema della resina che si attacca alle spatole, anche per le resine più delicate”.

Dott. Paulo Monteiro, membro onorario di Styleitaliano™

LM Dark Diamond™ offre vantaggi unici!

- Il moderno rivestimento in carbonio simile al diamante (DLC) riduce l'aderenza per un posizionamento agevole del composito
- La superficie dura protegge la punta dai graffi
- La superficie liscia consente una facile pulizia
- Il colore scuro del rivestimento permette di ridurre al minimo i riflessi e massimizzare il contrasto con l'otturazione
- L'impugnatura LM-ErgoSense® offre precisione e sensibilità tattile estreme.

LM-Arte™ Dark Diamond set

Set di strumenti LM-Arte™ con esclusivo rivestimento antiaderente LM Dark Diamond™ in cassetta LM-Servo™ 5 che comprende gli strumenti Eccesso DD, Modella DD, Fissura DD, Applica DD e Condensa DD

LMErgoSense® 6845ES



GAMMA PRODOTTI CON RIVESTIMENTO ANTIADERENTE



LM-Arte™ Eccesso DD LMErgoSense® 307-308DDES



LM-Arte™ Modella DD LMErgoSense® 442-443DDES



LM-Arte™ Fissura DD LMErgoSense® 481-487DDES



LM-Arte™ Applica DD LMErgoSense® 46-49DDES



LM-Arte™ Condensa DD LMErgoSense® 488-489DDES

GAMMA DI STRUMENTI COMPLETA



LM-Arte™ Applicata

LMErgoSense® 46-49ES

LMErgoMax™ 46-49XSI



LM-Arte™ Applicata Twist

LMErgoSense® 464-494ES

LMErgoMax™ 464-494XSI



LM-Arte™ Modella

LMErgoSense® 442-443ES

LMErgoMax™ 442-443XSI



LM-Arte™ Condensa

LMErgoSense® 488-489ES

LMErgoMax™ 488-489XSI



LM-Arte™ Misura

LMErgoSense® 496-497ES

LMErgoMax™ 496-497XSI



LM-Arte™ Posterior Misura

LMErgoSense® 498-499ES

LMErgoMax™ 498-499XSI



LM-Arte™ Cusp Misura

LMErgoSense® 468-469ES

LMErgoMax™ 468-469XSI



LM-Arte™ Fissura

LMErgoSense® 481-487ES

LMErgoMax™ 481-487XSI



LM-Arte™ Eccesso

LMErgoSense® 307-308ES

LMErgoMax™ 307-308XSI



LM-Arte™ Solo Anterior

LMErgoSense® 431-433ES

LMErgoMax™ 431-433XSI



LM-Arte™ Solo Posterior

LMErgoSense® 434-438ES

LMErgoMax™ 434-438XSI



LM-Arte™ Replica Posterior

LMErgoSense® 448-449ES

LMErgoMax™ 448-449XSI

SET DI STRUMENTI SELEZIONATI PER RESTAURI UNICI



LM-Arte™ Set

Set completo di strumenti per restauri anteriori nella cassetta LM-Servo™ 5 che include:

- LM-Arte™ Eccesso
- LM-Arte™ Misura
- LM-Arte™ Fissura
- LM-Arte™ Applica
- LM-Arte™ Condensa

LMErgoSense® 6840ES

LMErgoMax™ 6840XSI



LM-Arte™ Posterior Set

Set completo di strumenti per restauri posteriori nella cassetta LM-Servo™ 5 che include:

- LM-Arte™ Posterior Misura
- LM-Arte™ Cusp Misura
- LM-Arte™ Fissura
- LM-Arte™ Modella
- LM-Arte™ Condensa

LMErgoSense® 6844ES

LMErgoMax™ 6844XSI



LM-Arte™ Complete Set

Set completo di strumenti per qualsiasi caso di restauro nella cassetta LM-Servo™ 8 che include:

- LM-Arte™ Eccesso
- LM-Arte™ Misura
- LM-Arte™ Applica
- LM-Arte™ Posterior Misura
- LM-Arte™ Cusp Misura
- LM-Arte™ Fissura
- LM-Arte™ Modella
- LM-Arte™ Condensa

LMErgoSense® 6848ES

LMErgoMax™ 6848XSI

Opzioni impugnatura



LMErgoSense®

Tutti gli strumenti LM-Arte™ sono disponibili con l'impugnatura LM-ErgoSense® con un diametro più grande e un design che offre una presa eccezionale, forte di test clinici scientifici che ne hanno dimostrato l'ergonomia e l'efficienza. (Ø 13,7 mm).

L'impugnatura LM-ErgoSense® è disponibile con un chip RFID LM DTS™ integrato, una caratteristica esclusiva in grado di migliorare la gestione delle risorse e la sicurezza della paziente. Ulteriori informazioni sul sito www.dentaltracking.com



LMErgoMax™

Gli strumenti non rivestiti sono disponibili anche con il classico design ergonomico dell'impugnatura LM-ErgoMax™ che è ottimale in tutte le procedure cliniche e garantisce un'eccellente sensibilità tattile. (Ø 11,5 mm).

LMArte™ Solo Anterior e Posterior

COPPIA DI STRUMENTI PER SEMPLIFICARE I CASI NELLA ROUTINE QUOTIDIANA

Gli strumenti LMArte™ Solo sono ideali per semplificare i casi quotidiani: con soli due strumenti è possibile eseguire la maggior parte dei restauri in zone anteriori e posteriori garantendo la massima qualità.

Dalla modellazione all'ergonomia fino all'igiene, questi strumenti semplificano ogni singolo aspetto della procedura riducendo il numero di strumenti necessari sul vassoio. Arricchite la vostra strumentazione per odontoiatria restaurativa con questa coppia di strumenti, ideale per la routine di restauro diretto anteriore e posteriore in composito.



COME USARLO

Scansionare il codice QR per visualizzare i video "Come usarlo" degli strumenti LMArte™ Solo





UNO STRUMENTO PER IL VENEERING DIRETTO LM-Arte™ Solo Anterior

Strumento per restauri anteriori di qualità a elevato impatto estetico. Le spatole arrotondate e dritte sono progettate per la modellazione dei denti anteriori, in particolare delle superfici labiali.

Punta affilata

Modellazione di precisione
Micromodellazione
Contrassegno dei limiti
Scratching

Bordi dritti

Raschiatura

Profilo piatto

Appiattimento
Uniforme

Lama sottile

Modellazione prossimale

Profilo convesso

Modellazione a un punto
Creazione di depressioni
Creazione del profilo buccale
Creazione del profilo cervicale
Accesso alle aree difficili

Bordo angolato

Definizione
Raschiatura

Bordi affilati

Taglio, divisione, separazione
Creste marginali

Punta arrotondata

Delimitazione delicata
Contornatura cervicale



UNO STRUMENTO PER I DENTI POSTERIORI LM-Arte™ Solo Posterior

Strumento per restauri posteriori in composito di alta qualità. L'estremità condensatore di amalgama è progettata per il bulk-filling e la modellazione del materiale composito. L'estremità affilata consente la contornatura dell'anatomia oclusale.

Profilo piatto

Eliminazione di eccessi di grande entità
Eliminazione di eccessi di media entità

Estremità piatta

Otturatore

Area di sicurezza bulk-fill di 4-5 mm

Sonda per materiali bulk-fill

Profilo rastremato

Eliminazione di eccessi di piccola entità
Modellazione dell'inclinazione
Anatomia secondaria

Angolazione


Accesso per cavità profonde

Bordi semi-arrotondati

Formazione della pendenza
Eliminazione degli eccessi
Rimozione dei margini

Punta affilata


Modellazione di precisione
Micromodellazione
Contrassegno dei limiti
Scratching
Distribuzione del flusso
Eliminazione delle bolle

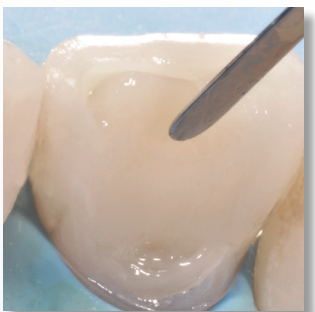

ELASTICITÀ E PRECISIONE LM-Arte™ Applica

Una spatola molto sottile e flessibile, progettata per l'applicazione e la modellazione estetica del composito. L'estremità di lavoro flessibile scolpisce delicatamente e con precisione gli strati di composito, consentendo di ricreare la naturale forma del dente. La punta sottile consente la modellazione in spazi ristretti o a contatto con la lamina della matrice. Lo strumento è disponibile con rivestimento antiaderente LM Dark Diamond™.


COME USARLO

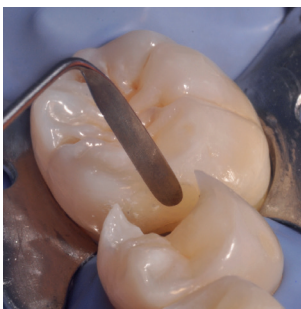

APPLICA CON UN TWIST LM-Arte™ Applica Twist

Spatola per la modellazione del composito particolarmente sottile, flessibile e stretta. Grazie ad Applica Twist la modellazione degli spazi approssimali e delle creste marginali diventa estremamente semplice: le sue estremità ricurve permettono di raggiungere aree difficili senza complicare inutilmente la posizione di lavoro della mano.

COME USARLO

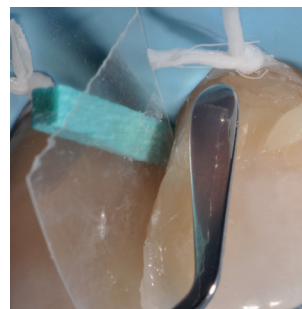

MODELLA CON FLESSIBILITÀ LM-Arte™ Modella

Spatola particolarmente larga e sottile destinata alla modellazione del composito. Adatta soprattutto a superfici dentarie ampie, come le facce vestibolari degli incisivi. La sua estremità larga permette di stendere efficacemente il composito. Flessibilità, sensibilità e nettezza della punta aiutano a creare precisi dettagli estetici. La spatola è utile anche per prelevare il composito dalla siringa. Lo strumento è disponibile con rivestimento LM Dark Diamond™.

COME USARLO






CONDENSA DELICATAMENTE

LM-Arte™ Condensa

Un condensatore lungo e arrotondato, specificamente progettato per la modellazione del composito. I suoi gambi angolati consentono l'accesso a qualsiasi tipo di cavità. Il condensatore ha un terminale spesso e uno sottile utilizzabili in cavità di diverse dimensioni, nei quadranti anteriori e posteriori. Le estremità arrotondate permettono una condensazione delicata senza rischio di adesione allo strumento. Lo strumento è disponibile con rivestimento antiaderente LM Dark Diamond™.



COME USARLO

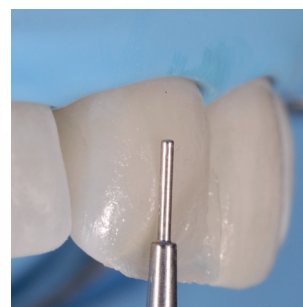

LO SPAZIO NECESSARIO

LM-Arte™ Misura

Uno strumento unico per la misurazione orizzontale e verticale dello spessore degli strati del composito nei restauri anteriori. Dopo aver posizionato lo strato di dentina, prima di polimerizzare

si pone l'estremità sottile a forma cilindrica a contatto con lo smalto naturale del dente. In questo modo, il composito residuo non polimerizzato che resta sotto la punta cilindrica può essere delicatamente modellato, lasciando lo spazio ottimale per lo strato di smalto in composito. La punta più spessa e corta di Misura invece va posizionata orizzontalmente sul margine della cavità preparata, in modo che il bordo della punta rimanga sullo smalto originale. Questo permette di determinare la giusta quantità di composito trasparente da applicare sulla linea di finitura. Il risultato? Un restauro estetico finale con la giusta calibratura di masse opache e traslucide, evitando il fastidioso effetto grigio dei compositi.

COME USARLO





MISURA E MODELLA

LM-Arte™ Posterior Misura

Versione posteriore del celebre strumento Misura. Progettato per la misurazione verticale dello spessore degli strati di composito sui restauri posteriori. La punta a forchetta dello strumento consente di modellare la parete prossimale, copiando l'altezza e l'anatomia del dente vicino, in presenza di una matrice.

COME USARLO



PRECISA VALUTAZIONE

LM-Arte™ Cusp Misura

Strumento unico per misurare spessore e altezza della cuspidale al fine di valutare la necessità di una sua preparazione durante l'esecuzione di restauri adesivi. Ideale per valutare la resistenza della struttura del dente naturale e scegliere la tecnica restaurativa da utilizzare. Se la punta dello strumento a forchetta penetra fino ai relativi contrassegni, significa che la struttura del dente è troppo debole per sopportare le forze occlusali con un restauro diretto ed è necessario prendere in considerazione altre opzioni cliniche.

COME USARLO



NOVITÀ!



Adattare



Modellare



Replicare

REPLICA SEMPLICE LM-Arte™ Replica Posterior

Strumento intelligente progettato per semplificare la modellazione occlusale dei denti posteriori nei restauri diretti in composito. Lo strumento rende la modellazione occlusale rapida, semplice e prevedibile. L'anatomia occlusale di un singolo dente può essere facilmente guidata dalle cuspidi buccali utilizzando la tecnica di replica con questo specifico strumento. Lo strumento ha un lato concavo e uno convesso.



“
Posso realizzare la modellazione in pochi secondi con semplici passaggi utilizzando la tecnica e lo strumento Replica Posterior”.

Dott. Osama Shaalan,
membro Gold di StyleItaliano™



Superficie concava

- Accentuazione della cuspidè
- Formazione della cresta
- Demarcazione della cuspidè
- Rimozione del composito in eccesso

Profilo convesso

- Trasporto del composito
- Adattamento
- Restringimento dei solchi
- Realizzazione di una superficie piatta
- Levigatura
- Realizzazione di depressioni

Bordo curvo e affilato per


- Taglio
- Separazione
- Creazione di solchi
- Demarcazione della cuspidè
- Creazione di curve

Bordi laterali

- Taglio
- Separazione
- Creazione di linee

COME USARLO



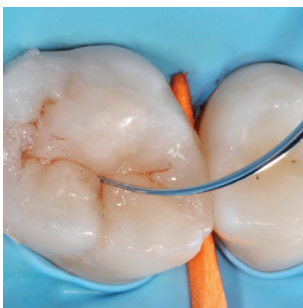

SCOLPIRE CAPOLAVORI

LM-Arte™ Fissura

Uno strumento di modellazione con punte estremamente affilate. L'estremità conica è progettata per scolpire, con un unico strumento, l'anatomia dell'area oclusale dei denti posteriori. La sottile punta a forma di sonda è ideale per la modellazione di solchi e lobi, nonché per la stratificazione di compositi di caratterizzazione e sigillanti. La flessibilità di Fissura permette un'esplorazione delicata e l'identificazione di possibili eccessi di resina sulla superficie dei denti ricostruiti. Lo strumento è disponibile con rivestimento antiaderente LM Dark Diamond™.

COME USARLO




ELIMINARE GLI ECCESSI

LM-Arte™ Eccesso

Uno strumento concepito per l'eliminazione dei residui di composito e bonding. Le speciali estremità di lavoro angolate di Eccesso sono ideali per la rimozione degli eccessi nelle zone cervicali anteriori e interprossimali dei molari. Questo strumento rigido e sottile si caratterizza per l'ottimale lunghezza, larghezza e spessore della lama. Lo strumento è disponibile con rivestimento antiaderente LM Dark Diamond™.


COME USARLO

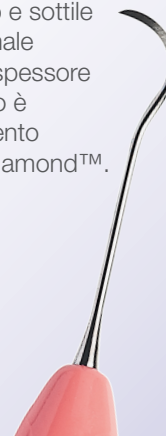

ELIMINARE LE DIFFICOLTÀ DELLA RETRAZIONE GENGIVALE CON **LMGengiva™**

Lo scopo del trattamento restaurativo di una lesione cervicale è quello di ottenere una perfetta sigillatura dei margini, una forte adesione e una lucidatura ottimale del composito. La retrazione gengivale meccanica nei restauri cervicali può essere traumatica se non effettuata correttamente.

Lo strumento LM-Gengiva™ con i retrattori gengivali viene utilizzato per evitare inutili lesioni della gengiva e ottenere il risultato clinico migliore. Questo metodo permette di conseguire il risultato finale desiderato: il tessuto molle non viene danneggiato e i requisiti estetici sono soddisfatti.

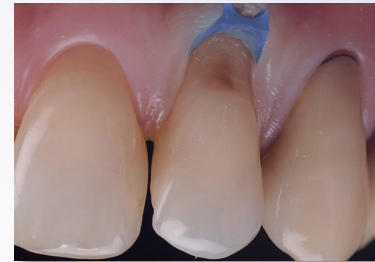

RETRATTORI GENGIVALI

- allontanano la gengiva dal restauro
- la durezza della punta in plastica permette una forte retrazione
- le punte in plastica consentono una certa flessibilità per un maggiore adattamento durante l'applicazione della pressione
- la punta agisce in modo da fornire una sigillatura ermetica tra gengiva e dente
- proteggono la gengiva e riducono il rischio di collasso per distacco
- l'interfaccia di adesione e il margine gengivale sono perfettamente visibili, in perfetto contrasto con i tessuti molli
- possibilità di personalizzazione con la fresa per l'adattamento a superfici radicolari convesse o concave
- i materiali adesivi non si incollano alla superficie delle punte
- non interferiscono con la polimerizzazione
- monouso



LM-Gengiva™ Kit di retrazione gengivale

LMErgoSense® 7556KES

LMErgoMax™ 7556KXSI

Incluso lo strumento manuale LM-Gengiva™, retrattori gengivali blu (assortimento di circa 90 pz., 30 pz./misura) e LM-MultiLever™ per rimuovere le estremità di lavoro in plastica.

LM Dental™

 LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen | Finlandia

Tel. +358 2 4546 400

info@lm-dental.com | www.lm-dental.com

